


## Dit stomi-øvesæt


Stomi-øvesættet er beregnet til at øve påsætning og skift af en stomibandage på en simuleret stomi inden eventuel operation.

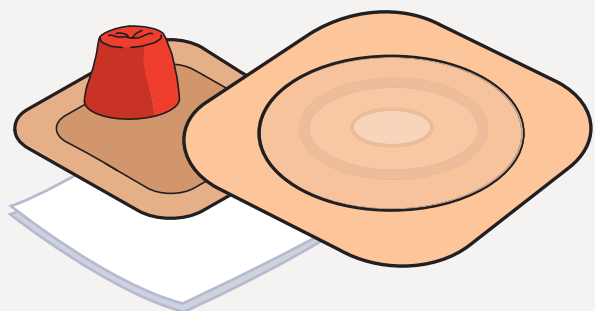


- 1** Fjern beskyttelsesfilmen fra trænings-klæbepladen, og sæt derefter trænings-klæbepladen på din mave på det sted, din stomisygeplejerske eller læge har angivet.



- 2** Fjern beskyttelsesfilmen fra stomimodellen, og sæt den på trænings-klæbepladen, som allerede sidder på din hud.

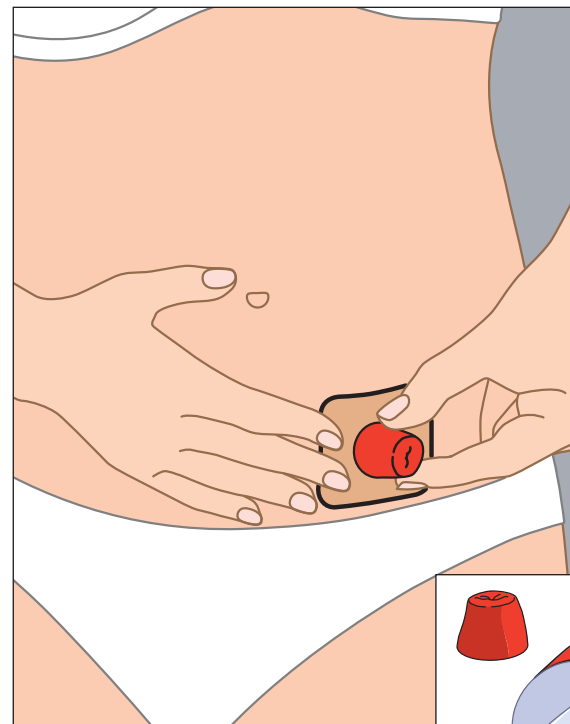

- 3** Fjern beskyttelsesfilmen fra klæbepladen. Centrér hullet over stomimodellen, og tryk forsigtigt klæbepladen mod trænings-klæbepladen og huden. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte din stomisygeplejerske eller din læge.

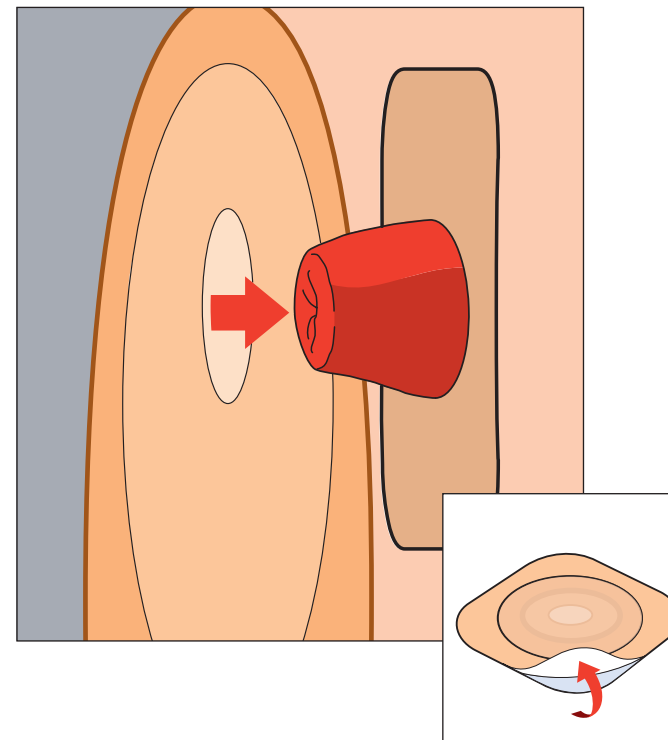

Dansac & Hollister  
Lille Kongevej 304, 3480 Fredensborg  
Tlf.: 48 46 5100  
hollister.dk@hollister.com  
www.hollister.dk

Hollister, Hollister logoet og "Healthy skin. Positive outcomes." er varemærker tilhørende Hollister Incorporated.  
© 2022 Hollister Incorporated  
[www.hollister.com](http://www.hollister.com)



Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, IL 60048 USA

EC REP


Hollister ULC  
Foxford Road, Ballina  
Co. Mayo, Ireland

 **Hollister**


**Ostomy Care**  
Healthy skin. Positive outcomes.

**4**

Hvis du bruger en 2-dels stomibandage, skal du fastgøre posen til klæbepladen.

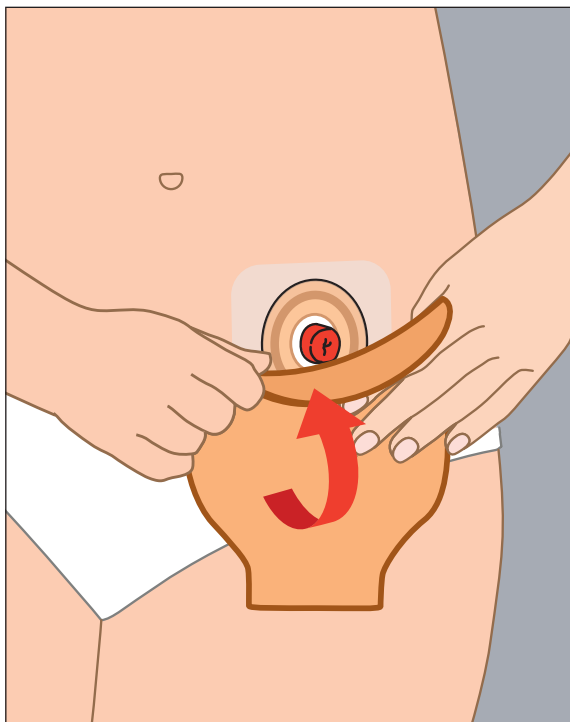
**5**

Når du tager trænings-klæbepladen og stomiposen af, skal du starte oppefra og forsigtigt fjerne posens klæbeplade fra huden. Træk forsigtigt nedad i klæbepladen, indtil den er helt af. Med dette vil du sandsynligvis også trække trænings-klæbepladen og stomimodellen af.

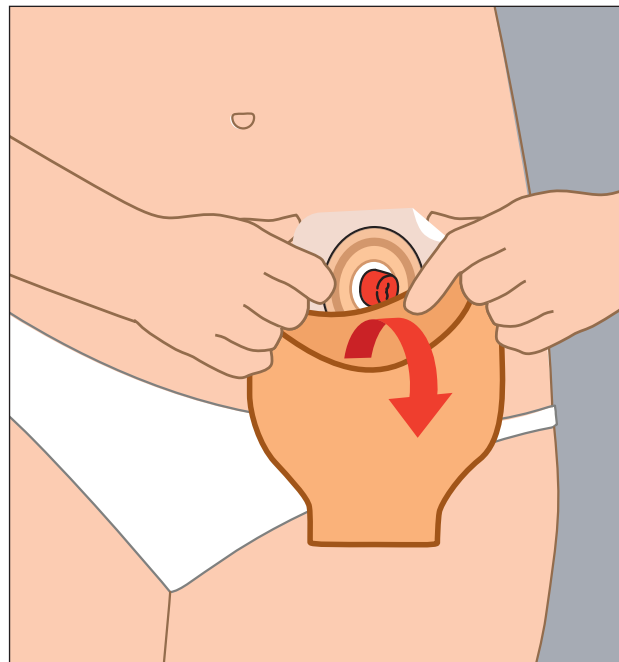

**Valgfrit:** Du kan bruge en klæbefjernerseviet (medfølger), når du fjerner klæbepladen og trænings-klæbepladen fra huden. Se de instruktioner, der fulgte med klæbefjernersevietterne.

Følg alle lokale bestemmelser for bortskaffelse.

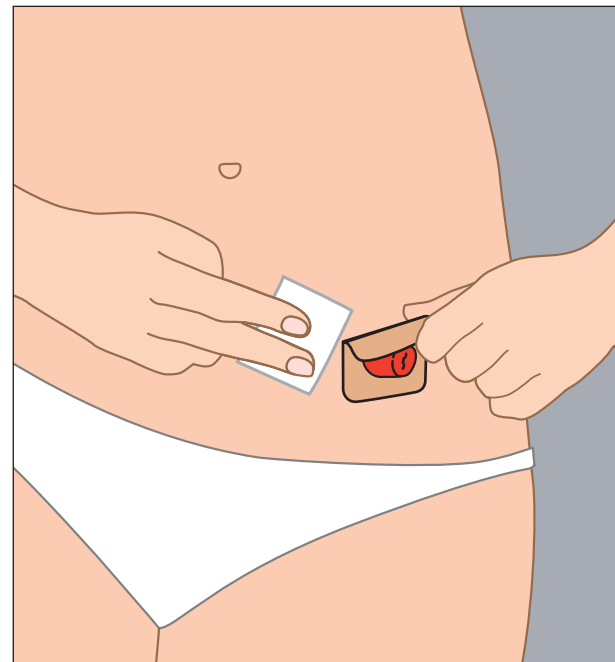

#### Indhold i stomi-øvesættet

- 2 Trænings-klæbeplader
- 2 Stomimodeller
- Stomibandage (kan være med i sættet eller leveres af din stomisygeplejerske)
- 2 Klæbefjernersevietter

#### Produktbeskrivelse

Trænings-klæbepladen, stomimodellen og stomibandagen (se Indhold) er beregnet til at blive fjernet og kasseret, når du er færdig med at øve dig. Trænings-klæbepladen og stomiklæbepladen er fremstillet af hydrokolloid, polymer-/copolymerplast og nonwoven tekstil. Stomimodellen er fremstillet af PU (polyuretan). Ikke fremstillet af latex (naturgummi).

#### Indikationer og tilsigtet brug

Stomi-øvesættet er beregnet til at øve påsætning og skift af en stomibandage på en simuleret stomi inden eventuel operation.

#### Advarsler


Genbrug af et engangsprodukt kan potentielt medføre risiko for brugeren såsom nedsat klæbeevne.

#### Forholdsregler

Brug kun som anvist. Afbryd brugen, hvis der opstår irritation. Hvis stomimodellen sættes direkte på huden, kan der opstå hudskader (f.eks. irritation, nedbrydning af huden, udslæt eller rødme).

#### Bemærkninger

For at sikre trænings-klæbepladens klæbeevne skal produktet sættes på ren, tør, intakt hud. Der må ikke benyttes olier eller lotion. Disse produkter kan påvirke klæbepladens klæbeevne. Kontakt en stomisygeplejerske eller læge for at få hjælp med stomibandagen eller ved hudirritation. I tilfælde af alvorlig personskade (ulykke) i forbindelse med din brug af produktet bedes du kontakte den lokale distributør eller producent samt de lokale myndigheder ([www.hollister.com/authority](http://www.hollister.com/authority)).

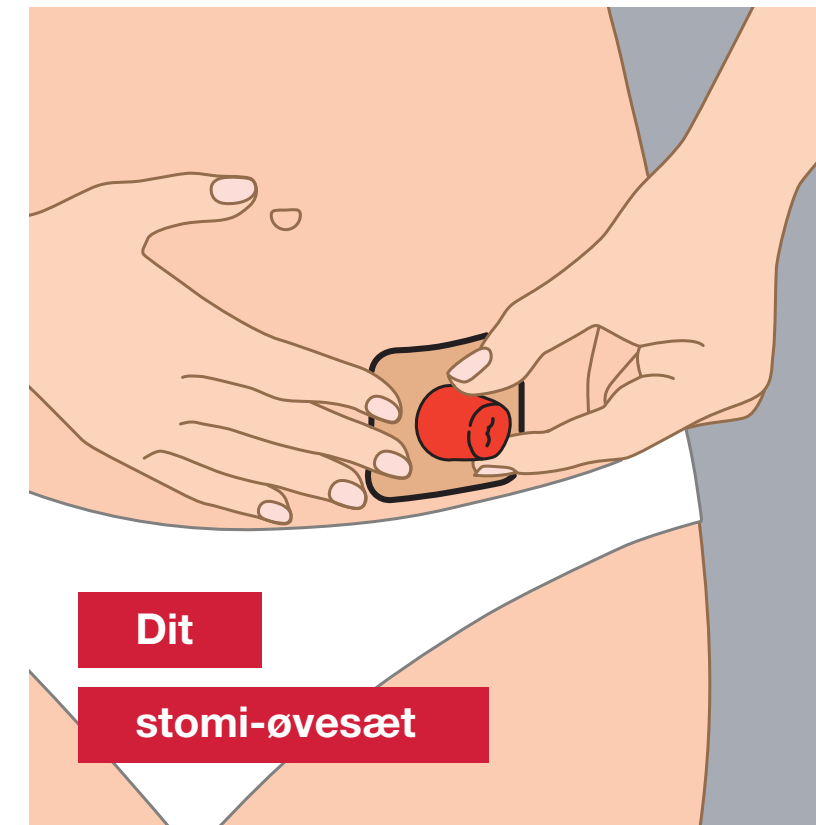

Dit

stomi-øvesæt



 **Hollister**

Ostomy Care  
Healthy skin. Positive outcomes.